



---

## **PROTOCOLO DE PLANIFICACIÓN DISEÑO DE GUÍA PARA IMPLANTES DENTALES PROGRAMA BLUE SKY PLAN**

---

Dr. Gustavo Bustamante

1. Abrir archivo DICOM
2. Recortar vistas y volumen de interés
3. Diseñar curva panorámica
4. Reconstrucción 3D. Superficie huesos transparentes. Recortar área de trabajo
5. Importar archivo STL.
6. Alinear archivo STL y cerrar modelo
7. Comprobación de alineación de archivo STL
8. Posicionamiento protésico de estructuras dentarias
9. Posicionamiento de implantes dentales
10. Posicionamiento de aditamento protésico de 15mm
11. Activar tubo guía y definir desplazamiento
12. Dibujar curva de guía quirúrgica
13. Reorientar la curva de la guía quirúrgica
14. Crear guía quirúrgica
15. Añadir ventanas a la guía quirúrgica
16. Exportar datos
17. Impresión